


smart FOB test


odběr vzorku

1.

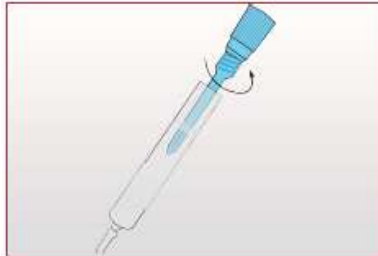

1.1


Odšroubujte uzávěr lahvičky.

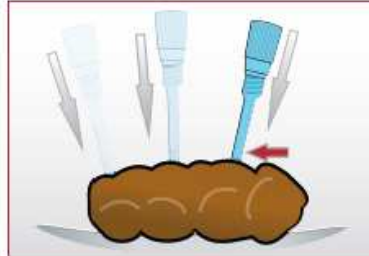

1.2


Špičatý konec aplikátoru zapíchněte na 5 až 6 různých místech do stolice tak, abyste získali homogenní vzorek. Dbejte na správný odběr – viz bod 3.

2.

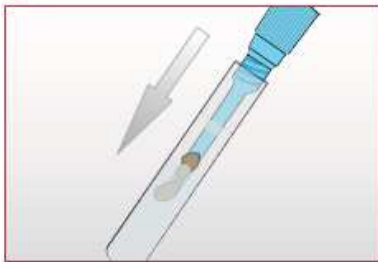


2.1

Našroubujte aplikátor na lahvičku a dobře uzavřete.

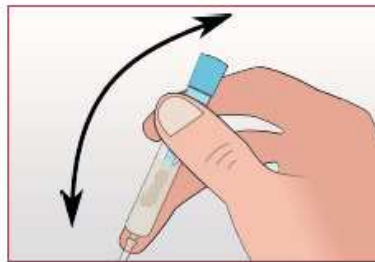

2.2

Lahvičku řádně protřepejte, aby se vzorek promíchal s pufrům.

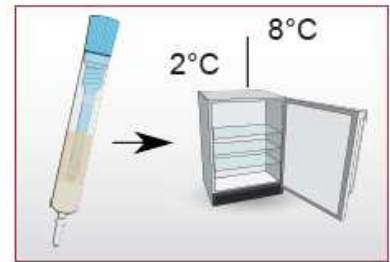

2.3

Vyplňte štítek s údaji o pacientovi. Lahvičku lze skladovat maximálně 10 dní při 2 – 8°C.

3.



3.1

SPRÁVNĚ: drážka je naplněná vzorkem



3.2

ŠPATNĚ: příliš mnoho vzorku. Přebytečné množství odstraňte.



3.3

ŠPATNĚ: příliš málo vzorku! Drážka musí být plná.