

návod k použití



ISE standard – nízká hladina

Kalibrační roztok pro stanovení Na, K, Cl na ISE modulu Dotachi analyzátorů.

• KAT. Č. / VEL. BAL.

Kat. č.	Vel. bal.
D8S414 nízká hladina	10 x 3 ml

• PŘÍPRAVA, VZHLED

Roztok je připraven k použití.
Vzhled: čirá bezbarvá kapalina

• SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladování:	2 – 8 °C, chránit před přímým světlem
Stabilita:	uzavřené lahvičky do data expirace

• UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po datu expirace!
- Nezmrazujte!
- Zbytky roztoků likvidujte dle platných předpisů.
- Nesprávné skladování nebo zacházení s kontrolním roztokem může ovlivnit výsledky.
- Pozor na mikrobiální kontaminaci (projeví se zvýšenou turbiditou roztoku).

Dle platné legislativy EU není roztok nebezpečný.

Šarže	1362	
Exp:	06/2012	
Natrium	120	mmol/l
Kalium	3	mmol/l
Chloridy	80	mmol/l



AUDIT DIAGNOSTICS
Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co. Cork (Ireland)
www.auditdiagnostics.ie

Distributor v ČR: dot diagnostics, s.r.o.

Ruzyňská 519/16
CZ - 161 00 Praha 6
Tel.: +420 235 318 612
Fax: +420 235 318 614
e-mail: dotdiag@dotdiag.cz